


Aantrekken met de Steve Glide Dolphin

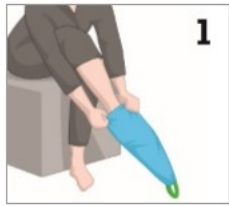

1

1 Plaats de Steve Glide over de voet



2

2 Trek de kous over de Steve Glide



3

3 Schuif de kous over de voet, zodat het hakstuk van de kous op de juiste plaats zit.



4

4 leg één hand stevig op de hiel en trek met de andere hand aan de lus van de Steve Glide



5

5 Trek de Steve Glide met kleine bewegingen uit de kous

Uittrekken met de Steve Glide Dolphin OFF



1

1 Trek de Steve Glide over uw voet



2

2 Plaats de elastische band om uw enkel over de Steve Glide heen




3

3 Trek het elastiek stevig vast



4

4 Rol de kous af over de elastische band

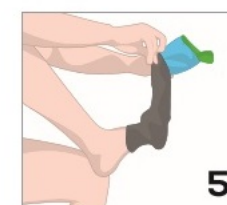

5

5 Pak uw kous vast en trek de kous uit.