


Zelfstandig aantrekken met Steve+

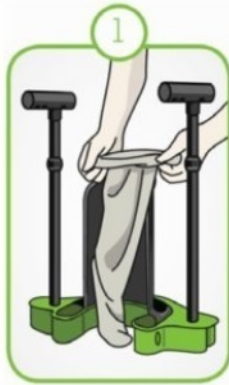

1 Installeer de kous over de zwarte beenkap.



2 Stroop de kous op tot het hakstuk van de kous bovenaan zit.



3 Steek uw voet in de kous.



4 Duw uw voet volledig in de kous en trek aan de handvatten met een op en neer gaande beweging tot de kous volledig aan is.

Zelfstandig uittrekken met Steve+



1 Plaats de ring tussen de kous en uw been, met de opening naar voren



2 Steek uw been tussen de handvatten door en plaats de groene basis over de ring



3 Druk de kous langzaam uit door de handvatten van u af te duwen



4 Blijf de Steve+ van u afduwen, tot de kous volledig uit is.