

Zelfstandig aantrekken van een beenkous




1 Stroop de kous over de Steve+ easyON

2 Stroop de kous op tot de hak bovenaan zit

3 Zet de Steve+ easyON op de grond en steek uw voet in de kous.

4 Druk op uw hiel en voet plat op de grond. Hierna kunt u de kous afrollen om uw been met behulp van de Steve+ easyON


Armkous aantrekken

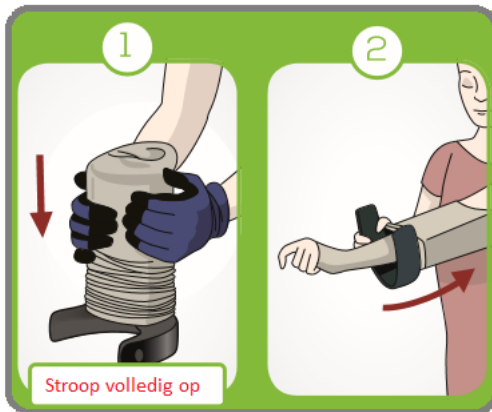

1 Stroop de armkous volledig op over de Steve easyON

2 Steek uw hand in de kous en pak de rand van de kous vast. Rol het armgedeelte van de kous af over uw arm met op en neer gaande bewegingen.

Aantrekken van een beenkous door een verzorger

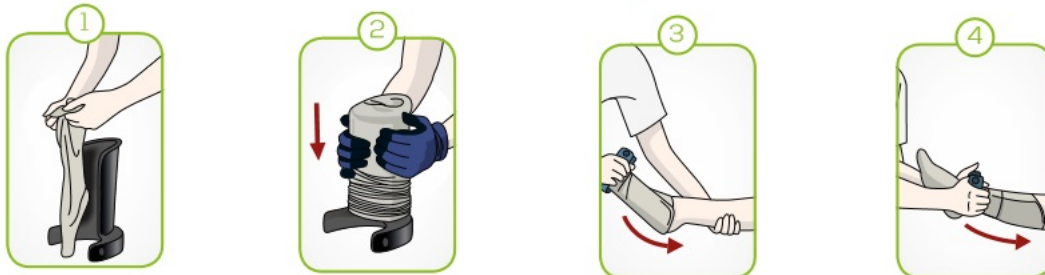

1 Stroop de kous over de Steve+ easyON

2 Stroop de kous op tot de hak bovenaan zit

3 Schuif de opening van de kous over de voet

4 stroop de kous met twee handen af om het been