


Steve+ EasyON

Zelfstandig aantrekken beenkous

OPZETTEN VAN DE KOUS



Sla de boord van de kous om. Nu heeft u goede grip.

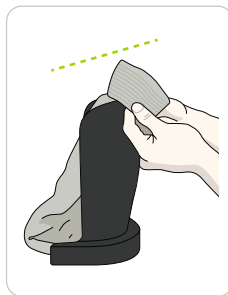

Schuif de kous eerst aan de achterkant over de Steve+ EasyON. Trek de kous naar beneden.




Stroop de kous op tot de hak van de kous voor de helft over de rand van de Steve+ EasyON zit. Trek de kous aan.

POSITIONERING VAN DE HAK



HAK ZIT TE HOOG

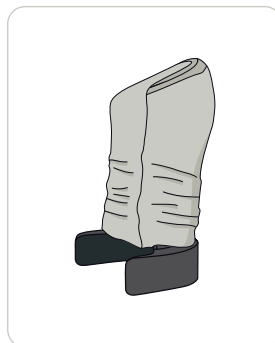

Stroop de hak van de kous minder ver over de rand van de Steve+ EasyON. Trek de kous aan.




HAK ZIT TE LAAG



Stroop de hak van de kous verder over de rand van de Steve+ EasyON. Trek de kous aan.



HAK ZIT GOED

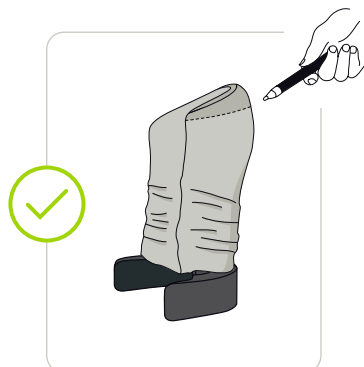

Tip: Markeer het punt tot waar u de kous op dient te stroppen.